

Indagerm 5G

Pronto Uso

Assistência à Saúde

**Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida
Desinfetante de Nível Intermediário**

QUATERNÁRIOS DE 5ª GERAÇÃO

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO

INDICAÇÃO:

INDAGERM 5G é um desinfetante pronto uso, a base de Quaternários de Amônio de 5ª geração e Biguanida, indicado para limpeza e desinfecção em um único procedimento, de superfícies fixas, artigos não críticos e materiais de inaloterapia e assistência respiratória em estabelecimentos de assistência à saúde. Portanto, recomendado para artigos; equipamentos como monitores em LCD, incubadoras, bombas de infusão, transdutores, respiradores e outros; superfícies, como pisos, azulejos, mesas, bancadas, paredes e mobílias, revestimentos em vinil, emborrachados, PVC ou linóleo, porcelanatos, vidros ou acrílicos, látex, aço inox, alumínio, cobre, ferro e latão, plásticos como PET, PVC, PP e polietileno. Eficácia comprovada contra: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Mycobacterium smegmatis e Mycobacterium bovis. FÓRMULA SEM CORANTE E SEM ÁLCOOL. NÃO IRRITANTE PARA OLHOS, MUCOSAS E PELE.

COMPOSIÇÃO:

Água, Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, Polihexametileno Biguanida e Tensoativo Não-lônico.

PRINCÍPIO ATIVO:

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio.....0,39% (3900ppm)
Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB).....0,26% (2600ppm)

MODO DE USO:

Limpeza e Desinfecção de Superfícies Fixas (**Espuma**): A espuma deve ser aplicada diretamente com auxílio de um pano ou mop sobre a superfície a ser tratada. Deixar em contato por 10 minutos e recolha com papel ou pano descartável. Não é necessário enxaguar. Não aplicar diretamente o produto nas superfícies dos eletroeletrônicos.

Limpeza e Desinfecção de Superfícies Fixas: Deve ser aplicado puro com auxílio de um pano ou mop sobre a superfície a ser tratada. Deixar em contato por 10 minutos. Não é necessário enxaguar. Não aplicar diretamente o produto nas superfícies dos eletroeletrônicos.

Desinfecção de Artigos não Críticos: Lavar, enxaguar e secar os artigos. Colocar os artigos no INDAGERM 5G puro, deixando imerso por 10 minutos. Retirar os artigos, enxaguar e secar.

Desinfecção de materiais de inaloterapia e assistência respiratória: Lavar, enxaguar e secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergi-los no INDAGERM 5G puro, deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS; Utilize material de proteção no seu manuseio; Mantenha o produto em sua embalagem original; Não reutilize embalagens vazias do produto; Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Manter em local fresco, protegido contra os raios solares.

PRECAUÇÕES:

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Ao manusear o produto, utilizar equipamento de proteção (máscaras, luvas, óculos e aventais) e pinças; Não beber, comer ou fumar durante o manuseio do produto.

PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações (0800 722 6001) ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

LOTE E VALIDADE:

Lote/Fabricação: Verificar Corpo da Embalagem. Validade: 24 meses.

APRESENTAÇÕES:

160mL Espuma - 24 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO ROSCA + CAIXA DE PAPELÃO
750mL Spray - 12 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO SPRAY + CAIXA DE PAPELÃO;
750mL Spray/Espuma - 15 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO COM GATILHO + CAIXA DE PAPELÃO;
1L Spray/Espuma - 12 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO COM GATILHO + CAIXA DE PAPELÃO;
1L - 12 FRASCOS DE PLÁSTICO OPACO GOTEJADOR + CAIXA DE PAPELÃO;
5L - 4 GALÕES PLÁSTICO + CAIXA DE PAPELÃO.

**Algumas apresentações, venda sob consulta.*

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

FORMA FÍSICA: LÍQUIDO.
ODOR: CARACTERÍSTICO.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

DOSEAMENTO BIGUANIDA: 0,221-0,299%
DOSEAMENTO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO: 0,3315-0,4485%, PH 5,0 A 8,0.
PESO MOLECULAR, DO TENSOATIVO (NÃO IÔNICO) ÁLCOOL GRAXO POLIGLICOLÉTER 7EO: 540G/MOL.
PESO MOLECULAR, DO TENSOATIVO (CATIÔNICO) CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO E CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO: 360G/MOL.

REGISTRO ANVISA:

Indagerm 5G -Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida-160mL Espuma

Registro MS – 3.2637.0029.001-7

Indagerm 5G -Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida-750mL Spray/Espuma

Registro MS – 3.2637.0029.002-5

Indagerm 5G -Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida-1L Spray/Espuma

Registro MS – 3.2637.0029.002-5

Indagerm 5G -Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida-750mL Spray

Registro MS – 3.2637.0029.003-3

Indagerm 5G -Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida-1L

Registro MS – 3.2637.0029.004-1

Indagerm 5G -Desinfetante Quaternários de Amônio e Biguanida-5L

Registro MS – 3.2637.0029.005-1



**EMPRESA CERTIFICADA PELA ANVISA
EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO**